

## FIBROBRONCOSCOPIO, VIDEOBRONCOSCOPIO, FIBROBRONCOSCOPIO ULTRASÓNICO

Modelo;

BF-1T150	BF-260	BF-MP190F	BF-P290	BF-TE2	BF-UC180F
BF-1T180	BF-3C160	BF-MP290F	BF-P60	BF-XP160F	BF-UC190F
BF-1T260	BF-3C40	BF-MP60	BF-PE2	BF-XP190	BF-UC260FW
BF-1T60	BF-6C260	BF-N20	BF-Q170	BF-XP260F	BF-UC290F
BF-1TH190	BF-F260	BF-P150	BF-Q180	BF-XP290	-
BF-1TQ170	BF-H190	BF-P180	BF-Q180-AC	BF-XP60	-
BF-1TQ180	BF-H290	BF-P190	BF-Q190	BF-XT160	-
BF-1TQ290	BF-MP160F	BF-P260F	BF-Q290	BF-XT190	-

Nota: La disponibilidad del producto depende del país

## 1. Manual de instrucciones

Las secciones siguientes proporcionan información actualizada sobre el diámetro de la porción de inserción en las especificaciones y precauciones antes de utilizar los endoscopios con tubo endotraqueal. Los cambios se resumen a continuación y se identifican por medio de un formato subrayado en las secciones posteriores de este Anexo. Las demás partes del manual de instrucciones no se modifican.

#1 Las precauciones antes de usar los endoscopios con tubo endotraqueal se añaden en el capítulo "Información importante - Leer antes de usar" en la sección "Advertencias y precauciones" de algunos broncoscopios.

#2 Se añade el diámetro máximo de inserción a las especificaciones del capítulo 2, "2.2 Especificaciones".

## 2. Precauciones en "Información importante — Leer antes del uso"

### **Precauciones**

- Antes de insertar el broncoscopio con un tubo endotraqueal en el paciente, deslice el tubo a lo largo de toda la porción de inserción del broncoscopio para confirmar que la porción de inserción del broncoscopio puede introducirse suavemente en el tubo endotraqueal. Si no se puede insertar suavemente, se puede dañar el material de recubrimiento de la sección de curvado del broncoscopio o la superficie externa de la porción de inserción. Cuando utilice un lubricante, realice la confirmación anterior antes de aplicar el lubricante.

### 3. "Especificaciones" en las especificaciones del capítulo 2.2

Número de modelo	Especificaciones		
	(a) Diámetro exterior de extremo distal (mm)	(b) Diámetro exterior del tubo de inserción (mm)	<u>(c) Diámetro exterior máximo del tubo de inserción (mm)</u>
BF-1T150	6	6	<u>7,1</u>
BF-1T180	6	6	<u>7,1</u>
Número de modelo	Especificaciones		
	(a) Diámetro exterior de extremo distal (mm)	(b) Diámetro exterior del tubo de inserción (mm)	<u>(c) Diámetro exterior máximo del tubo de inserción (mm)</u>
BF-1T260	5,9	6	<u>7,1</u>
BF-1T60	5,9	6	<u>6,7</u>
BF-1TH190	6,2	6	<u>7,2</u>
BF-1TQ170	5,9	6	<u>7,05</u>
BF-1TQ180	6,3	6,2	<u>7,35</u>
BF-1TQ290	5,9	6	<u>7,2</u>
BF-260	4,9	4,9	<u>5,8</u>
BF-3C160	3,8	3,8	<u>4,5</u>
BF-3C40	3,3	3,6	<u>4,2</u>
BF-6C260	5,9	5,7	<u>7,1</u>
BF-F260	5,5	5,4	<u>6,7</u>
BF-H190	5,5	5,1	<u>6,6</u>
BF-H290	6	5,7	<u>7,2</u>
BF-MP160F	4	4,4	<u>5,0</u>
BF-MP190F	3	3,7	<u>4,2</u>
BF-MP290F	3	3,7	<u>4,2</u>
BF-MP60	4	4,4	<u>5,0</u>
BF-N20	1,8	2,2	<u>2,4</u>
BF-P150	5,3	5,1	<u>6,29</u>
BF-P180	4,9	4,9	<u>5,9</u>
BF-P190	4,2	4,1	<u>4,9</u>
BF-P260F	4	4,4	<u>5,0</u>
BF-P290	4,2	4,1	<u>4,9</u>
BF-P60	4,9	5	<u>5,7</u>
BF-PE2	4,9	5	<u>5,6</u>
BF-Q170	4,8	4,9	<u>6,0</u>
BF-Q180	5,5	5,1	<u>6,5</u>
BF-Q180-AC	5,5	5,3	<u>6,5</u>
BF-Q190	4,8	4,9	<u>6,0</u>
BF-Q290	4,8	4,9	<u>6,1</u>
BF-TE2	5,9	6	<u>6,7</u>
BF-XP160F	2,8	2,8	<u>3,3</u>
BF-XP190	3,1	2,8	<u>3,3</u>
BF-XP260F	2,8	2,8	<u>3,25</u>
BF-XP290	3,1	2,8	<u>3,3</u>
BF-XP60	2,8	2,8	<u>3,25</u>
BF-XT160	6,2	6,3	<u>7,3</u>
BF-XT190	6,1	6,3	<u>7,1</u>
BF-UC180F	6,9	6,3	<u>7,3</u>
BF-UC190F	6,6	6,3	<u>7,0</u>

Número de modelo	Especificaciones		
	(a) Diámetro exterior de extremo distal (mm)	(b) Diámetro exterior del tubo de inserción (mm)	<b><u>(c) Diámetro exterior máximo del tubo de inserción (mm)</u></b>
BF-UC260FW	6,9	6,3	<b><u>7,3</u></b>
BF-UC290F	6,6	6,3	<b><u>7,0</u></b>