

Addendum

FIBROSCOPIO PARA INTUBACIÓN TRAQUEAL, VIDEOENDOSCOPIO PARA INTUBACIÓN TRAQUEAL

Modelo;

LF-TP
LF-DP
LF-GP
LF-V
LF-P

Nota: La disponibilidad del producto depende del país

1. Manual de instrucciones

Las secciones siguientes proporcionan información actualizada sobre el diámetro de la porción de inserción en las especificaciones y precauciones antes de utilizar los endoscopios con tubo endotraqueal. Los cambios se resumen a continuación y se identifican por medio de un formato subrayado en las secciones posteriores de este Anexo. Las demás partes del manual de instrucciones no se modifican.

#1 Las precauciones antes de usar los endoscopios con tubo endotraqueal se actualizan en el capítulo "Información importante - Leer antes de usar" en la sección "Advertencias y precauciones".

#2 Se añade el diámetro máximo de inserción a las especificaciones del capítulo 2, "2.2 Especificaciones".

2. Precauciones en “Información importante — Leer antes del uso”

Precauciones

- Antes de insertar el endoscopio para intubación traqueal con un tubo endotraqueal en el paciente, deslice el tubo a lo largo de toda la porción de inserción del endoscopio para intubación traqueal para confirmar que la porción de inserción del endoscopio para intubación traqueal puede introducirse suavemente en el tubo endotraqueal. Si no se puede insertar suavemente, se puede dañar el material de recubrimiento de la sección de curvado del endoscopio para intubación

traqueal o la superficie externa de la porción de inserción. Cuando utilice un lubricante, realice la confirmación anterior antes de aplicar el lubricante.

3. "Especificaciones" en las especificaciones del capítulo 2.2

Número de modelo	Especificaciones		
	(a) Diámetro exterior de extremo distal (mm)	(b) Diámetro exterior del tubo de inserción (mm)	<u>(c) Diámetro exterior máximo del tubo de inserción (mm)</u>
LF-TP	5,1	5,2	<u>5,95</u>
LF-DP	3,1	3,1	<u>3,4</u>
LF-GP	3,8	4,1	<u>4,5</u>
LF-V	3,8	4,1	<u>4,5</u>
LF-P	1,8	2,2	<u>2,4</u>