

Anexo al Manual para médicos y cuidadores

Español

Trilogy Evo, Trilogy Evo O2, Trilogy Evo Universal y Trilogy EV300

Este apéndice se aplica a la plataforma Trilogy Evo (Trilogy Evo, Trilogy Evo O₂, Trilogy Evo Universal, y Trilogy EV300) y a los manuales clínico y del cuidador. Las siguientes secciones complementan o sustituyen la información contenida en dichos manuales. El operador del dispositivo es responsable de leer y comprender este apéndice antes de su uso.



Contraindicaciones

Si el paciente presenta algunos de los siguientes problemas, consulte al profesional médico que atienda al paciente antes de usar ventilación no invasiva:

- incapacidad para mantener una vía respiratoria permeable o secreciones suficientemente claras
- riesgo de aspirar contenidos gástricos
- sinusitis aguda u otitis media
- epistaxis que provoque aspiración pulmonar de sangre
- hipotensión

El modo de terapia AVAPS-AE está contraindicado para uso invasivo y para pacientes con peso inferior a 10 kg.

La función AVAPS está contraindicada para pacientes con un peso inferior a 10 kg.

Nota: El modo de terapia AVAPS-AE y la función AVAPS no están disponibles para los dispositivos Trilogy Evo Universal.

Filtro de partículas

El uso del filtro de partículas es necesario para proteger el aparato de la suciedad y el polvo. Sustitúyalo al menos una vez al mes y entre un paciente y otro.

Nota: El filtro lleva impresa la fecha de fabricación (FAB [MM/AAAA]); el filtro debe utilizarse en un plazo de 5 años a partir de esa fecha.



Filtro de partículas

Alarmas de sistema de prioridad baja: Filtros de entrada bloqueados

Por qué se genera	Los filtros de entrada se bloquean y la terapia administrada se reduce.
Qué hacer	• ¿Están bloqueadas las entradas de aire? • Retire, enjuague y vuelva a instalar el filtro de espuma de entrada de aire. Deseche y sustituya el filtro de partículas. Consulte las instrucciones del manual de su dispositivo.
Rendimiento del dispositivo	El dispositivo sigue en funcionamiento.



Filtro de espuma de entrada de aire

Distancia de separación con la antena Bluetooth

Este producto cumple los requisitos de exposición a RF cuando se coloca a una distancia de al menos 20 cm del cuerpo.

Nota: La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso que Philips Respironics haga de dichas marcas se hace bajo licencia.