

# **URGENTE: AVISO DE SEGURIDAD**

**Kits de tubos de traqueostomía BLUselect® , Kits de tubos de traqueostomía BLUselect® Suctionaid® , Kit o bandeja de procedimiento de traqueostomía de dilatación percutánea BLUgriggs® con tubo de traqueostomía BLUselect® con o sin pinzas, Bandeja de procedimiento de dilatación BLUperc® con productos de dilatador de una etapa, Kit o bandeja de procedimiento de traqueostomía de dilatación percutánea BLUperc® con o sin tubo de traqueostomía BLUselect®.**


15 de agosto de 2024

Estimados clientes de BLUSelect®,

Smiths Medical, Inc. emite este aviso urgente de seguridad para notificarle un posible defecto con los siguientes productos BLUSelect®, BLUgriggs® y BLUperc® enumerados en el Anexo 1\_Producto afectado. Esta carta detalla el problema y los pasos que debe seguir.

## **Problema:**

Smiths Medical ha identificado la posibilidad de desconexión del balón piloto de la línea de inflado de traqueostomía en lotes específicos de los productos BLUSelect®, BLUgriggs® y BLUperc® debido a un defecto de fabricación. Vea el ejemplo fotográfico del problema a continuación.

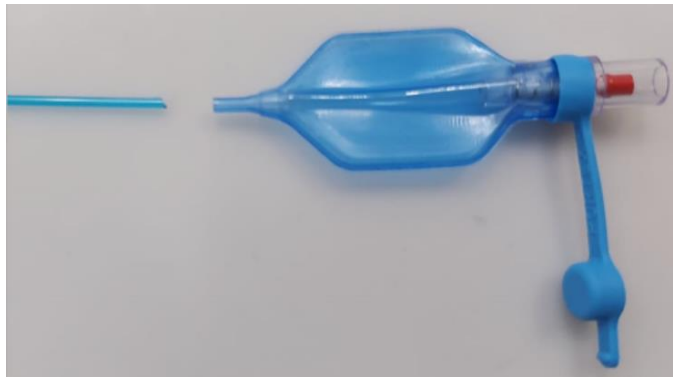

## **Riesgo potencial:**

Si el globo piloto utilizado para inflar el manguito de traqueostomía se desprende de la línea de inflado, es posible que no se mantenga la presión del manguito, lo que puede provocar una ventilación inadecuada del paciente y un mayor riesgo de aspiración. Hasta la fecha, Smiths Medical ha recibido trece (13) informes de lesiones graves y cero (0) muertes asociadas a este problema.

## **Producto afectado**

Por favor, vea el artículo afectado y los números de lote en el Anexo 1\_Lista de Productos Afectados y también el rango de fechas de distribución del producto.

## **Acciones de Smiths Medical:**

Smiths Medical envía esta notificación a todos los clientes de BLUSelect®, BLUgriggs® y BLUperc® que recibieron productos de Smiths Medical enumerados en el Anexo 1\_Producto afectado. Smiths Medical proporcionará crédito a los clientes afectados al recibir un formulario de respuesta completo que confirme la destrucción del producto.

**Acciones requeridas por el cliente:**

Al utilizar el dispositivo, todas las instrucciones, incluidas las advertencias y precauciones contenidas en la Documentación de Instrucciones de Uso, deben seguirse con la máxima atención. Por favor, lleve a cabo las siguientes acciones

1. Compruebe todas las ubicaciones de inventario dentro de su institución para los números de catálogo y números de lote afectados enumerados en la notificación e interrumpa su uso. 2. Deseche todos los productos afectados siguiendo el proceso de desecho de su institución. Si no es posible desechar inmediatamente el producto en sus instalaciones, póngalo en cuarentena hasta su eliminación..
2. Comparta esta notificación con todos los usuarios potenciales del dispositivo para asegurarse de que están al tanto de esta notificación y de las mitigaciones propuestas. Si los dispositivos se utilizan en otro lugar, asegúrese de que esta comunicación se entrega allí.
3. Rellene y envíe el formulario de respuesta del cliente adjunto a [EMEA-FSN@icumed.com](mailto:EMEA-FSN@icumed.com) en un plazo de 10 días a partir de su recepción para acusar recibo de esta notificación.
4. **DISTRIBUIDORES:** Si ha distribuido productos potencialmente afectados a sus clientes, reenvíeles inmediatamente este aviso y pídeles que cumplimenten el formulario de respuesta y se lo devuelvan a USTED. A continuación, el DISTRIBUIDOR deberá cumplimentar un ÚNICO formulario con los datos requeridos y devolverlo a [EMEA-FSN@icumed.com](mailto:EMEA-FSN@icumed.com).

Para más información, póngase en contacto con Smiths Medical utilizando la siguiente información:

CONTACTO Smiths Medical	INFORMACIÓN DE CONTACTO	Áreas de Soporte
Gestión global de reclamaciones	<a href="mailto:globalcomplaints@icumed.com">globalcomplaints@icumed.com</a>	Para notificar efectos adversos o reclamaciones sobre productos
Customer Service	<a href="https://www.icumed.com/about-us/contact-us">https://www.icumed.com/about-us/contact-us</a>	Preguntas sobre la sustitución del producto y/o el abono en cuenta.

La agencia reguladora de su país ha sido notificada de esta acción

Smiths Medical está comprometido con la seguridad del paciente y se centra en proporcionar una fiabilidad excepcional del producto y el más alto nivel de satisfacción del cliente. Gracias por su rápido apoyo en este importante asunto.

Apreciamos su cooperación.

Atentamente,



Andy Mathein  
Vice President of Quality

**Adjuntos:**

- Formulario de respuesta del cliente (véase más abajo)
- Lista de productos afectados (Archivo adjunto 1)

## URGENTE: AVISO DE SEGURIDAD – FORMULARIO DE RESPUESTA

**Kits de tubos de traqueostomía BLUselect® , Kits de tubos de traqueostomía BLUselect® Suctionaid® , Kit o bandeja de procedimiento de traqueostomía de dilatación percutánea BLUgriggs® con tubo de traqueostomía BLUselect® con o sin pinzas, Bandeja de procedimiento de dilatación BLUperc® con productos de dilatador de una etapa, Kit o bandeja de procedimiento de traqueostomía de dilatación percutánea BLUperc® con o sin tubo de traqueostomía BLUselect®.**

15 de agosto de 2024

**Compruebe su inventario y cumplimente la información que figura a continuación, aunque no disponga del producto afectado. No cumplimentar todas las secciones de esta página puede dar lugar a un crédito inadecuado, retrasado o denegado.**

Devuelva el formulario cumplimentado a [EMEA-FSN@icumed.com](mailto:EMEA-FSN@icumed.com). Si tiene alguna pregunta sobre este formulario, póngase en contacto con [EMEA-FSN@icumed.com](mailto:EMEA-FSN@icumed.com) o con su representante de ventas local.

Nombre del hospital/instalación	
Dirección del hospital/instalación	
Número de teléfono	
Nombre y cargo de la persona que completa este formulario	
Firma de la persona que completa este formulario	
Fecha	
Si lo compró a través de un distribuidor, indique el nombre/ubicación del distribuidor aquí para fines de trazabilidad.	

Por favor, seleccione una opción:

- NO tengo productos afectados (cumplimente y envíe este formulario a la dirección de correo electrónico arriba indicada)
- Sí, tengo productos afectados, lo he notificado a los usuarios de mis instalaciones y he seguido las instrucciones que se me han facilitado y destruido todos los artículos afectados (véase el cuadro siguiente).**

Si dispone del producto afectado, rellene el cuadro 1:

**TABLA 1**

Código / Número de referencia	Número de Lote	Cantidad en inventario (unidades)	Cantidad destruida (unidades)	Fecha de Destrucción

Si ya ha distribuido el producto, complete la tabla 2 con la información recibida de sus clientes y responda a ICU Medical con toda la información.

**TABLA 2**

Código / Número de referencia	Número de Lote	Cantidad destruida localmente (unidades)	Fecha de Destrucción

Los efectos adversos y las reclamaciones relacionados con el uso de este producto deben notificarse y enviarse por correo electrónico al Departamento de Gestión Global de Reclamaciones de Smiths Medical en [globalcomplaints@icumed.com](mailto:globalcomplaints@icumed.com)







101/563/080	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4385041
101/563/080	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4385042
101/563/080	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4385043
101/563/080	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4385046
101/563/080	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4385047
101/563/080	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4385048
101/563/080	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4385049
101/563/080	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4385050
101/563/080	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4385051
101/563/080	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4396416
101/563/080	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4396535
101/563/080	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4396536
101/563/080	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4396537
101/563/090	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 9.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4009974
101/563/090	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 9.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4061111
101/563/090	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 9.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4170970
101/563/090	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 9.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4212065
101/563/090	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 9.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4227249
101/563/090	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 9.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4238178
101/563/090	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 9.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4281031
101/563/090	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 9.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4348865
101/563/090	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 9.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4348866
101/563/090	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 9.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4348867
101/563/090	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 9.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4386559
101/563/090	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 9.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4408641
101/563/090	BLUperc® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 9.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4412148
101/800/060CZ	BLUSELECT 6.0, CUFFED, NON-FEN	4230149
101/800/060CZ	BLUSELECT 6.0, CUFFED, NON-FEN	4252500
101/800/060CZ	BLUSELECT 6.0, CUFFED, NON-FEN	4382002
101/800/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, NON-FEN	4156971
101/800/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, NON-FEN	4217804
101/800/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, NON-FEN	4238237
101/800/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, NON-FEN	4249341
101/800/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, NON-FEN	4305944
101/800/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, NON-FEN	4305947
101/800/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, NON-FEN	4368641
101/800/075CZ	BLUSELECT 7.5, CUFFED, NON-FEN	4249234
101/800/075CZ	BLUSELECT 7.5, CUFFED, NON-FEN	4348898
101/800/075CZ	BLUSELECT 7.5, CUFFED, NON-FEN	4348899
101/800/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4156969
101/800/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4224695
101/800/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4230078
101/800/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4232686
101/800/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4247407
101/800/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4270931
101/800/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4291190
101/800/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4305933
101/800/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4305934
101/800/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4305935
101/800/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4305936
101/800/085CZ	BLUSELECT 8.5, CUFFED, NON-FEN	4348861
101/800/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	4217803
101/800/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	4238236
101/800/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	4261648
101/800/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	4273231
101/800/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	4306047
101/800/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	4310439
101/800/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	4376612
101/800/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	4387369
101/800/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, NON-FEN	4306058
101/802/060CZ	BLUSELECT 6.0, CUFFED, FEN	4382046
101/802/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, FEN	3972531
101/802/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, FEN	4268672
101/802/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, FEN	4310441
101/802/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, FEN	4423828

101/802/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, FEN	4436040
101/802/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, FEN	4456953
101/802/085CZ	BLUSELECT 8.5, CUFFED, FEN	4028454
101/802/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, FEN	3954847
101/802/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, FEN	3968282
101/810/060CZ	BLUSELECT 6.0, CUFFED, NON-FEN	3887495
101/810/060CZ	BLUSELECT 6.0, CUFFED, NON-FEN	4106722
101/810/060CZ	BLUSELECT 6.0, CUFFED, NON-FEN	4268673
101/810/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, NON-FEN	3887478
101/810/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, NON-FEN	4106813
101/810/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, NON-FEN	4243097
101/810/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, NON-FEN	4254571
101/810/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, NON-FEN	4285856
101/810/075CZ	BLUSELECT 7.5, CUFFED, NON-FEN	3887504
101/810/075CZ	BLUSELECT 7.5, CUFFED, NON-FEN	4222083
101/810/075CZ	BLUSELECT 7.5, CUFFED, NON-FEN	4249233
101/810/075CZ	BLUSELECT 7.5, CUFFED, NON-FEN	4281153
101/810/075CZ	BLUSELECT 7.5, CUFFED, NON-FEN	4381994
101/810/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	3887481
101/810/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	3887481
101/810/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4173265
101/810/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4207825
101/810/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4217114
101/810/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4230143
101/810/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4285773
101/810/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4306016
101/810/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4312272
101/810/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4381980
101/810/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4387365
101/810/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4403461
101/810/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4415817
101/810/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, NON-FEN	4423832
101/810/085CZ	BLUSELECT 8.5, CUFFED, NON-FEN	4178022
101/810/085CZ	BLUSELECT 8.5, CUFFED, NON-FEN	4306011
101/810/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	3887482
101/810/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	3993623
101/810/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	4106736
101/810/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	4173266
101/810/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	4243117
101/810/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	4306027
101/810/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	4327669
101/810/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	4403367
101/810/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, NON-FEN	4458561
101/810/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, NON-FEN	4175497
101/810/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, NON-FEN	4217875
101/810/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, NON-FEN	4249333
101/810/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, NON-FEN	4291208
101/810/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, NON-FEN	4310443
101/810/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, NON-FEN	4312263
101/810/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, NON-FEN	4387368
101/810/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, NON-FEN	4397557
101/812/060CZ	BLUSELECT 6.0, CUFFED, FEN	3976752
101/812/060CZ	BLUSELECT 6.0, CUFFED, FEN	4106752
101/812/060CZ	BLUSELECT 6.0, CUFFED, FEN	4294444
101/812/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, FEN	3968279
101/812/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, FEN	4106754
101/812/070CZ	BLUSELECT 7.0, CUFFED, FEN	4242910
101/812/075CZ	BLUSELECT 7.5, CUFFED, FEN	3968280
101/812/075CZ	BLUSELECT 7.5, CUFFED, FEN	4217831
101/812/075CZ	BLUSELECT 7.5, CUFFED, FEN	4268677
101/812/075CZ	BLUSELECT 7.5, CUFFED, FEN	4381979
101/812/075CZ	BLUSELECT 7.5, CUFFED, FEN	4413594
101/812/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, FEN	4106756
101/812/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, FEN	4227246
101/812/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, FEN	4234757

101/812/080CZ	BLUSELECT 8.0, CUFFED, FEN	4385065
101/812/085CZ	BLUSELECT 8.5, CUFFED, FEN	4028504
101/812/085CZ	BLUSELECT 8.5, CUFFED, FEN	4191164
101/812/085CZ	BLUSELECT 8.5, CUFFED, FEN	4222085
101/812/085CZ	BLUSELECT 8.5, CUFFED, FEN	4261649
101/812/085CZ	BLUSELECT 8.5, CUFFED, FEN	4382043
101/812/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, FEN	4075795
101/812/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, FEN	4106757
101/812/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, FEN	4170983
101/812/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, FEN	4217120
101/812/090CZ	BLUSELECT 9.0, CUFFED, FEN	4243118
101/812/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, FEN	4064797
101/812/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, FEN	4245460
101/812/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, FEN	4381995
101/812/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, FEN	4388732
101/812/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, FEN	4413618
101/812/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, FEN	4423838
101/812/100CZ	BLUSELECT 10.0, CUFFED, FEN	4443290
101/860/070CZ	BLUSELECT 7.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	3887509
101/860/070CZ	BLUSELECT 7.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4303383
101/860/075CZ	BLUSELECT 7.5, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4386514
101/860/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4234707
101/860/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4392809
101/860/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4405273
101/860/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4405274
101/860/090CZ	BLUSELECT 9.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4306063
101/860/090CZ	BLUSELECT 9.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4310533
101/870/070CZ	BLUSELECT 7.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	3968404
101/870/070CZ	BLUSELECT 7.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4156953
101/870/070CZ	BLUSELECT 7.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4178001
101/870/070CZ	BLUSELECT 7.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4217826
101/870/070CZ	BLUSELECT 7.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4249291
101/870/070CZ	BLUSELECT 7.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4256336
101/870/070CZ	BLUSELECT 7.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4283719
101/870/070CZ	BLUSELECT 7.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4291171
101/870/075CZ	BLUSELECT 7.5, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4061022
101/870/075CZ	BLUSELECT 7.5, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4183954
101/870/075CZ	BLUSELECT 7.5, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4212004
101/870/075CZ	BLUSELECT 7.5, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4249236
101/870/075CZ	BLUSELECT 7.5, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4270941
101/870/075CZ	BLUSELECT 7.5, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4382010
101/870/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4117931
101/870/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4163106
101/870/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4208997
101/870/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4238168
101/870/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4254564
101/870/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4303380
101/870/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4310523
101/870/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4312285
101/870/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4317581
101/870/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4319800
101/870/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4368642
101/870/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4388736
101/870/080CZ	BLUSELECT 8.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4390747
101/870/085CZ	BLUSELECT 8.5, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4156983
101/870/085CZ	BLUSELECT 8.5, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4212070
101/870/085CZ	BLUSELECT 8.5, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4249238
101/870/085CZ	BLUSELECT 8.5, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4376585
101/870/090CZ	BLUSELECT 9.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4183974
101/870/090CZ	BLUSELECT 9.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4242948
101/870/090CZ	BLUSELECT 9.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4249307
101/870/090CZ	BLUSELECT 9.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4285763
101/870/090CZ	BLUSELECT 9.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4285764
101/870/090CZ	BLUSELECT 9.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4303381
101/870/090CZ	BLUSELECT 9.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4387367

101/870/100CZ	BLUSELECT 10.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4106718
101/870/100CZ	BLUSELECT 10.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4217806
101/870/100CZ	BLUSELECT 10.0, SUCTIONAID, CUFFED, NON-FEN	4306010
101/891/080	BLUgriggs® Percutaneous Dilation Procedural Kit with forceps and 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4306752
101/891/090	BLUgriggs® Percutaneous Dilation Procedural Kit with forceps and 9.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube	4310412
101/893/080	BLUgriggs® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube, no forceps	4289001
101/893/080	BLUgriggs® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube, no forceps	4310416
101/893/080	BLUgriggs® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube, no forceps	4310417
101/893/080	BLUgriggs® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube, no forceps	4310419
101/893/080	BLUgriggs® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube, no forceps	4343143
101/893/080	BLUgriggs® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube, no forceps	4382056
101/893/080	BLUgriggs® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube, no forceps	4382058
101/893/080	BLUgriggs® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube, no forceps	4382059
101/893/080	BLUgriggs® Percutaneous Dilation Procedural Kit with 8.0mm BLUselect® Suctionaid® Trach Tube, no forceps	4382060