

Drägerwerk AG & Co. KGaA, 23542 Lübeck

A nuestros clientes de las
estaciones de anestesia Atlan

Octubre 2024

Nota Importante de Seguridad

**Posible fallo de la ventilación automática
debido a un error en la electrónica del motor**

**Sólo están afectadas las estaciones de anestesia Atlan A100, A300, A300XL, A350 y A350XL
con números de serie según la lista adjunta.**

Ningún otro modelo de equipo de anestesia está afectado

Estimados Sres.,

Durante nuestras actividades de vigilancia de mercado de producto global, hemos detectado casos en los que las estaciones de anestesia Atlan han indicado un fallo del pistón del ventilador antes del uso o un fallo de la ventilación mecánica durante el uso. Hasta la fecha, no se ha reportado ningún daño a paciente.

Nuestras investigaciones han revelado que estas incidencias se deben a un fallo en la electrónica del motor causado por una desviación en el proceso de ensamblado de carácter temporal. Esto podría afectar a las estaciones de anestesia Atlan con números de serie dentro del intervalo mencionado anteriormente. Según nuestros registros, Vd. ha recibido uno o más equipos dentro del intervalo de números de serie afectados.

Si el error se produce antes del uso, por ejemplo, cuando está en modo espera o durante en modo test del sistema, la ventilación mecánica podría no iniciarse. Si el error ocurre durante una intervención, la ventilación mecánica podría fallar y el equipo mostrará una alarma con el mensaje: «¡Fallo del ventilador!». En ambos casos, se puede llevar a cabo la ventilación o la respiración manual. Podría ser necesario ventilar al paciente manualmente para evitarle lesiones. Aun con la alarma de fallo de ventilación, el Atlan seguirá funcionando en modo de ventilación Man/Spon, al igual que la dosificación de gas limpio, medicamento y todas las funciones de monitorización sin restricciones.

Nuestro servicio técnico Dräger Service contactará con Vd. para sustituir el motor gratuitamente.

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislunger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania
Dirección postal:
23542 Lübeck, Alemania
Tel. +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com

Cuenta bancaria:
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN: DE95 2304 0022 0014 6795 00
Swift-Code: COBA DE FF 230

Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE15 2305 0101 0001 0711 17
Swift-Code: NOLADE21SPL

Sede de la sociedad: Lübeck
Registro mercantil:
Juzgado municipal de Lübeck HRB
7903 HL
Socio colectivo:
Drägerwerk Verwaltungs AG
Sede de la sociedad: Lübeck
Registro mercantil:
Juzgado municipal de Lübeck HRB
7395 HL
N.º de IVA: DE135082211

Presidente del Consejo de
Supervisión de
Drägerwerk AG & Co. KGaA y
Drägerwerk Verwaltungs AG:
Stefan Lauer

Junta directiva:
Stefan Dräger (Presidente)
Stefanie Hirsch
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow
Dr. Reiner Piske

Hasta entonces, por favor, continúe utilizando sus equipos con el cuidado habitual y bajo supervisión permanente conforme a las Instrucciones de uso del Atlan.

Si la ventilación mecánica fallase, utilice el modo de ventilación Man/Spon para ventilar al paciente manualmente cuando sea conveniente.

Si es necesario, puede reducir la prioridad de alarma «¡Fallo del ventilador!» con «RESTABLECIMIENTO DE ALARMA».

Lamentamos los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar.

Por favor, asegúrese de que todos los usuarios del Atlan, así como el resto del personal de su organización estén informados de esta Nota Importante de Seguridad.

Por favor, cumplimente y devuelva la Tarjeta de respuesta adjunta para su confirmación.

Si ha puesto a disposición de terceros los equipos, por favor, envíeles copia de la presente Nota Importante de Seguridad.

Por favor, conserve la presente Nota Importante de Seguridad al menos hasta que el motor se haya reemplazado.

Se ha informado a las autoridades competentes sobre esta acción.

Identificación de los productos sanitarios afectados:

Según nuestros registros, Vd. ha recibido al menos un dispositivo de anestesia Atlan fabricado por Drägerwerk AG & Co. KGaA que podría verse afectado por esta incidencia.

Contacto:

Si requiere alguna aclaración, por favor, no dude en ponerse en contacto con su representante local Dräger.

Lamentamos los inconvenientes que esta medida pueda causarles.

Un cordial saludo,

Firmado en versión inglesa

Christoph Marquardt
Product Management
Business Unit Therapy

Oliver Möller
Post Market Surveillance
Quality and Regulatory Affairs

Anexo a la Nota Importante de Seguridad: lista de dispositivos afectados

Dispositivo	Referencia	Basic UDI DI
Atlan A100	8621100	040486751301035FK19X030W4
Atlan A300	8621300	040486751301035FK 19ZOOOW9
Atlan A300 XL	8621400	
Atlan A350	8621500	040486751301035FK19T010V2
Atlan A350 XL	8621600	

Atlan A100

Mes de fabricación	Números de serie	
01-2024	ASTA-...	-
02-2024	ASTB-...	0211
03-2024	ASTC-...	-
04-2024	ASTD-...	0285; 0286
05-2024	ASTE-...	0056; 0083; 0199; 0200; 0245; 0370; 0371; 0372; 0373; 0374; 0375
06-2024	ASTF-...	0155
07-2024	ASTH-...	0023; 0088; 0119; 0209
08-2024	ASTJ-...	-
09-2024	ASTK-...	0001; 0037

Atlan A300

Mes de fabricación	Números de serie	
01-2024	ASTA-...	0314; 0315; 0325; 0338; 0340; 0384; 0411; 0425
02-2024	ASTB-...	0002; 0010; 0018; 0151; 0160; 0161; 0165; 0175; 0176; 0177; 0178; 0179; 0180; 0181; 0182; 0214; 0215; 0218; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0248; 0249; 0250; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0276; 0277; 0278; 0279; 0280
03-2024	ASTC-...	0008; 0025; 0036; 0037; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042; 0046; 0047; 0048; 0049; 0050; 0062; 0063; 0064; 0077; 0078; 0079; 0080; 0081; 0089; 0090; 0091; 0092; 0093; 0102; 0103; 0104; 0123; 0124; 0125; 0126; 0127; 0133; 0139; 0140; 0150; 0151; 0152; 0153; 0154; 0169; 0176; 0177; 0178; 0179; 0182; 0183; 0184; 0185; 0186; 0187; 0192; 0195; 0196; 0200; 0201; 0202; 0203; 0242
04-2024	ASTD-...	0028; 0051; 0052; 0080; 0081; 0082; 0083; 0084; 0085; 0086; 0087
05-2024	ASTE-...	0012; 0013; 0014; 0015; 0041; 0042; 0043; 0044; 0063; 0064; 0065; 0084; 0176; 0177; 0178; 0179; 0243; 0244; 0282; 0299
06-2024	ASTF-...	0005; 0006; 0019; 0027; 0028; 0029; 0048; 0049; 0050; 0072; 0073; 0074; 0075; 0082; 0093; 0110; 0111; 0162; 0166; 0167; 0197; 0198; 0220; 0221; 0222; 0301; 0406; 0434
07-2024	ASTH-...	0001; 0002; 0003; 0024; 0025; 0041; 0042; 0043; 0044; 0097; 0098; 0099; 0115; 0116; 0117; 0118; 0149; 0150; 0151; 0152; 0153; 0195; 0196; 0197; 0198; 0220; 0221; 0222; 0227; 0228; 0229; 0230; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0274; 0275; 0276; 0277; 0297; 0298; 0299;

Mes de fabricación	Números de serie	
		0304; 0305; 0328; 0329; 0355; 0356; 0357; 0393; 0394; 0395; 0396; 0407; 0408; 0409; 0410; 0423; 0424; 0425; 0426; 0427; 0428; 0445; 0446; 0447; 0448; 0449; 0465; 0466; 0467; 0468; 0469; 0470; 0484; 0485; 0486; 0487
08-2024	ASTJ-...	
09-2024	ASTK-...	0033; 0034; 0035; 0062

Atlan A300 XL

Mes de fabricación	Números de serie	
01-2024	ASTA-...	-
02-2024	ASTB-...	0051; 0053; 0054; 0055; 0063; 0065; 0093; 0162
03-2024	ASTC-...	-
04-2024	ASTD-...	-
05-2024	ASTE-...	0219; 0220; 0221; 0222; 0377
06-2024	ASTF-...	0472; 0473
07-2024	ASTH-...	0005; 0006; 0026; 0027; 0047; 0186; 0223; 0224; 0401
08-2024	ASTJ-...	0170
09-2024	ASTK-...	-

Atlan A350

Mes de fabricación	Números de serie	
01-2024	ASTA-...	0279; 0293; 0302; 0303; 0304; 0306; 0334; 0335; 0336; 0344; 0347; 0348; 0360; 0369; 0373; 0375; 0376; 0377; 0379; 0380; 0381; 0386; 0389; 0390; 0392; 0393; 0399; 0412; 0422; 0433; 0435; 0437; 0438
02-2024	ASTB-...	0009; 0011; 0012; 0015; 0016; 0017; 0019; 0024; 0025; 0026; 0027; 0035; 0036; 0038; 0039; 0042; 0043; 0044; 0045; 0047; 0050; 0056; 0058; 0059; 0060; 0062; 0067; 0069; 0070; 0072; 0073; 0085; 0086; 0087; 0088; 0089; 0090; 0091; 0092; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 0119; 0120; 0121; 0123; 0124; 0125; 0126; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0152; 0153; 0154; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0163; 0164; 0166; 0167; 0168; 0169; 0170; 0171; 0172; 0173; 0174; 0183; 0184; 0185; 0186; 0187; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0194; 0196; 0197; 0198; 0199; 0200; 0201; 0202; 0203; 0204; 0205; 0207; 0208; 0209; 0210; 0212; 0213; 0221; 0222; 0223; 0224; 0225; 0226; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0243; 0244; 0245; 0246; 0247; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0281; 0282; 0283; 0284; 0285; 0292; 0293; 0294; 0295; 0296; 0297; 0298; 0299; 0300; 0301; 0302; 0303; 0310; 0311; 0312; 0313; 0314; 0315; 0316

Mes de fabricación	Números de serie	
03-2024	ASTC-...	0005; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0027; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0043; 0044; 0045; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0065; 0066; 0067; 0071; 0072; 0073; 0074; 0075; 0076; 0084; 0085; 0086; 0087; 0088; 0094; 0095; 0096; 0097; 0098; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0120; 0121; 0122; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0134; 0135; 0141; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0162; 0164; 0165; 0166; 0167; 0168; 0170; 0171; 0172; 0188; 0189; 0190; 0191; 0193; 0197; 0198; 0199; 0204; 0205; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0231; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277
04-2024	ASTD-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0005; 0006; 0007; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0036; 0037; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042; 0043; 0044; 0045; 0046; 0047; 0048; 0049; 0053; 0054; 0055; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060; 0067; 0068; 0069; 0070; 0071; 0072; 0073; 0074; 0075; 0076; 0077; 0078; 0079; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 0119; 0125; 0126; 0127; 0128; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0142; 0143; 0148; 0149; 0150; 0151; 0152; 0153; 0155; 0156; 0157; 0158; 0170; 0171; 0177; 0178; 0179; 0180; 0184; 0185; 0186; 0196; 0197; 0198; 0199; 0200; 0201; 0202; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0218; 0219; 0220; 0221; 0222; 0223; 0224; 0234; 0235; 0236; 0237; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277; 0278; 0279; 0280; 0281; 0282; 0283; 0284
05-2024	ASTE-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0005; 0006; 0007; 0008; 0009; 0010; 0011; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0026; 0027; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0036; 0037; 0038; 0039; 0040; 0045; 0046; 0047; 0048; 0049; 0050; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0061; 0066; 0067; 0068; 0069; 0070; 0071; 0072; 0073; 0074; 0075; 0076; 0080; 0081; 0082; 0088; 0089; 0090; 0091; 0092; 0093; 0094; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 0119; 0120; 0121; 0132; 0133; 0134; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0150; 0151; 0152; 0153; 0154; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0162; 0167; 0168; 0169; 0170; 0180; 0181; 0182; 0183; 0184; 0185; 0186; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0194; 0204; 0205; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0218; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0232;

Mes de fabricación	Números de serie	
		0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277; 0283; 0284; 0285; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0292; 0293; 0294; 0295; 0296; 0297; 0298; 0307; 0308; 0309; 0310; 0311; 0312; 0313; 0314; 0315; 0316; 0317; 0318; 0319; 0320; 0321; 0322; 0323; 0324; 0330; 0331; 0332; 0333; 0334; 0335; 0336; 0337; 0338; 0339; 0340; 0341; 0342; 0343; 0344; 0345; 0346; 0347; 0363; 0364; 0365; 0366; 0367; 0368; 0369; 0376
06-2024	ASTF-...	0007; 0008; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0026; 0038; 0039; 0040; 0041; 0042; 0043; 0044; 0045; 0046; 0047; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060; 0064; 0065; 0066; 0067; 0068; 0069; 0083; 0084; 0085; 0087; 0088; 0089; 0090; 0091; 0092; 0094; 0095; 0096; 0097; 0098; 0099; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0114; 0115; 0116; 0117; 0120; 0126; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0149; 0150; 0152; 0153; 0154; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0163; 0164; 0165; 0171; 0172; 0173; 0174; 0175; 0176; 0177; 0178; 0179; 0180; 0181; 0182; 0183; 0184; 0185; 0186; 0187; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0199; 0200; 0201; 0202; 0203; 0204; 0205; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0217; 0218; 0219; 0223; 0224; 0225; 0226; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0243; 0244; 0245; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0255; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263; 0264; 0265; 0266; 0267; 0268; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275; 0276; 0277; 0278; 0279; 0280; 0281; 0282; 0283; 0284; 0285; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0292; 0293; 0294; 0295; 0296; 0297; 0298; 0299; 0300; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0310; 0311; 0312; 0313; 0314; 0315; 0316; 0317; 0318; 0319; 0320; 0321; 0322; 0323; 0324; 0325; 0326; 0327; 0328; 0329; 0330; 0331; 0332; 0333; 0334; 0335; 0336; 0337; 0338; 0339; 0340; 0341; 0342; 0343; 0344; 0345; 0346; 0347; 0348; 0349; 0350; 0351; 0352; 0353; 0354; 0355; 0356; 0357; 0358; 0359; 0360; 0361; 0362; 0363; 0364; 0365; 0366; 0367; 0368; 0369; 0370; 0371; 0372; 0373; 0374; 0375; 0376; 0377; 0378; 0379; 0380; 0381; 0382; 0383; 0384; 0385; 0386; 0387; 0388; 0389; 0390; 0391; 0392; 0393; 0394; 0395; 0396; 0397; 0398; 0399; 0400; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0407; 0408; 0412; 0413; 0414; 0415; 0416; 0417; 0418; 0419; 0420; 0421; 0422; 0423; 0424; 0425; 0426; 0427; 0428; 0429; 0430; 0431; 0432; 0433; 0439; 0440; 0441; 0442; 0443; 0444; 0445; 0446; 0447; 0448; 0449; 0450; 0451; 0452; 0453; 0454; 0455; 0456; 0457; 0458; 0459; 0460; 0461; 0462; 0463; 0464; 0465; 0466; 0467; 0468; 0469; 0470

Mes de fabricación	Números de serie	
07-2024	ASTH-...	0004; 0013; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0036; 0037; 0038; 0048; 0049; 0050; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0056; 0057; 0058; 0059; 0060; 0061; 0062; 0063; 0064; 0065; 0066; 0067; 0068; 0069; 0070; 0071; 0072; 0073; 0074; 0077; 0078; 0079; 0080; 0083; 0084; 0085; 0086; 0087; 0089; 0090; 0091; 0100; 0101; 0102; 0103; 0104; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0110; 0111; 0112; 0113; 0114; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0154; 0155; 0156; 0157; 0158; 0159; 0160; 0161; 0162; 0163; 0164; 0165; 0166; 0167; 0168; 0177; 0178; 0179; 0180; 0181; 0182; 0183; 0184; 0185; 0199; 0200; 0201; 0202; 0203; 0205; 0206; 0207; 0208; 0210; 0211; 0212; 0213; 0214; 0215; 0216; 0231; 0232; 0233; 0234; 0235; 0236; 0237; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0247; 0248; 0249; 0250; 0251; 0252; 0253; 0254; 0262; 0263; 0264; 0265; 0268; 0283; 0284; 0285; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0292; 0300; 0301; 0321; 0322; 0323; 0340; 0341; 0342; 0343; 0344; 0345; 0346; 0347; 0348; 0349; 0350; 0351; 0352; 0353; 0354; 0366; 0367; 0368; 0369; 0370; 0371; 0372; 0373; 0374; 0375; 0376; 0377; 0378; 0379; 0380; 0381; 0391; 0392; 0397; 0398; 0399; 0400; 0402; 0411; 0432; 0433; 0438; 0439; 0454; 0455; 0456; 0457; 0458; 0459; 0460; 0461; 0462; 0463; 0464; 0471; 0472; 0473; 0474; 0475; 0482; 0483
08-2024	ASTJ-...	0026; 0027; 0028; 0029; 0030; 0073; 0074; 0075; 0076; 0103; 0162; 0197; 0198; 0199; 0200; 0208; 0256
09-2024	ASTK-...	0003; 0004; 0005; 0006; 0007; 0008; 0009

Atlan A350 XL

Mes de fabricación	Números de serie	
01-2024	ASTA-...	0253; 0289; 0290; 0307; 0309; 0311; 0327; 0349; 0350; 0351; 0353; 0362; 0363; 0365; 0394; 0404; 0405; 0408; 0409; 0426; 0427; 0428; 0429; 0430
02-2024	ASTB-...	0003; 0005; 0007; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032; 0033; 0048; 0075; 0076; 0077; 0079; 0080; 0081; 0082; 0083; 0084; 0134; 0195; 0206; 0219; 0220; 0237; 0286; 0287; 0288; 0289; 0290; 0291; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309; 0317; 0318; 0319; 0320; 0321; 0322
03-2024	ASTC-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0006; 0007; 0026; 0068; 0069; 0070; 0082; 0083; 0099; 0100; 0101; 0105; 0106; 0107; 0108; 0109; 0118; 0119; 0136; 0137; 0138; 0163; 0180; 0181; 0194; 0229; 0230; 0243; 0244; 0245
04-2024	ASTD-...	0008; 0009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0014; 0015; 0016; 0050; 0061; 0062; 0063; 0064; 0065; 0066; 0129; 0130; 0131; 0132; 0133; 0134; 0135; 0154; 0159; 0160; 0161; 0162; 0163; 0164; 0165; 0166; 0167; 0168; 0169; 0181; 0182; 0183; 0193; 0194; 0195; 0203; 0204; 0205;

Mes de fabricación	Números de serie	
		0225; 0226; 0227; 0228; 0229; 0230; 0231; 0238; 0239; 0240; 0241; 0242; 0243; 0244; 0245; 0265; 0266; 0267
05-2024	ASTE-...	0016; 0017; 0034; 0035; 0057; 0058; 0059; 0060; 0062; 0077; 0078; 0079; 0085; 0086; 0087; 0108; 0122; 0123; 0124; 0125; 0126; 0127; 0128; 0129; 0130; 0131; 0163; 0164; 0165; 0166; 0171; 0172; 0173; 0174; 0175; 0195; 0196; 0197; 0198; 0202; 0203; 0223; 0224; 0225; 0226; 0246; 0247; 0248; 0249; 0250; 0278; 0279; 0280; 0281; 0300; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0325; 0326; 0327; 0328; 0329; 0348; 0349; 0350; 0351; 0352; 0353; 0354; 0355; 0356; 0357; 0358; 0359; 0360; 0361; 0362
06-2024	ASTF-...	0001; 0002; 0003; 0004; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0030; 0031; 0032; 0033; 0034; 0035; 0036; 0037; 0051; 0052; 0053; 0054; 0055; 0061; 0062; 0063; 0070; 0071; 0076; 0077; 0078; 0079; 0080; 0081; 0112; 0113; 0121; 0122; 0123; 0124; 0125; 0135; 0136; 0137; 0138; 0139; 0140; 0141; 0168; 0169; 0170; 0194; 0195; 0196; 0409; 0410; 0411; 0435; 0436; 0437; 0438; 0471; 0474; 0475; 0476; 0477; 0478
07-2024	ASTH-...	0007; 0008; 0009; 0010; 0011; 0012; 0039; 0040; 0045; 0046; 0081; 0082; 0092; 0093; 0094; 0095; 0096; 0120; 0121; 0122; 0123; 0124; 0125; 0126; 0142; 0143; 0144; 0145; 0146; 0147; 0148; 0169; 0170; 0171; 0172; 0173; 0174; 0175; 0176; 0187; 0188; 0189; 0190; 0191; 0192; 0193; 0194; 0204; 0217; 0218; 0219; 0225; 0226; 0243; 0244; 0245; 0246; 0255; 0256; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0293; 0294; 0295; 0296; 0306; 0307; 0308; 0309; 0310; 0311; 0324; 0325; 0326; 0327; 0330; 0331; 0332; 0333; 0334; 0335; 0336; 0337; 0338; 0339; 0358; 0359; 0360; 0361; 0362; 0363; 0364; 0365; 0382; 0383; 0384; 0385; 0386; 0387; 0388; 0389; 0390; 0403; 0404; 0405; 0406; 0434; 0435; 0436; 0437; 0450; 0451; 0452; 0453; 0476; 0477; 0478; 0479; 0480; 0481; 0488; 0489; 0490; 0491
08-2024	ASTJ-...	0063; 0064; 0065; 0066; 0067; 0068; 0089; 0090; 0091; 0092; 0145; 0146; 0147; 0171; 0237
09-2024	ASTK-...	0002; 0010; 0011; 0012; 0013; 0014; 0015; 0016; 0017; 0018; 0019; 0020; 0021; 0022; 0023; 0024; 0025; 0026; 0027; 0028; 0029; 0030; 0031; 0032

Tarjeta de respuesta de cliente

Por favor, remita este formulario a Dräger por correo electrónico

D R Ä G E R	Para:	Dräger Hispania, SAU		
	Departamento:	QARAEHS		
	Teléfono:	900116424		
	E-mail:	DraegerQARAEHS@draeger.com		
Respuesta: Nota Importante de Seguridad sobre la estación Atlan, Octubre 2024				
Por favor, cumplimente en mayúsculas los campos inferiores				
D A T O S C L I E N T E	Hospital/Centro:			
	Persona de contacto:			
	Teléfono:		Fax:	
	E-mail:			
	Dirección:			
	Localidad/Provincia:		País:	
	Nº unidades afectadas:			
	☐ Confirmamos que hemos recibido la Nota de Seguridad y que la información se ha puesto en conocimiento de todos los usuarios afectados.			
Título/posición: _____				
Nombre y Apellidos: _____				
Firma: _____ Fecha: _____				