

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-003	REFERENCIA PS/AVG/93679
PRODUCTO Ventilador de emergencia y transporte Oxylog 3000 plus. Referencias: 5704811 y 5704813. UDI-DI: 040486751304015FK19Z000XW.	
FABRICANTE Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Dräger Hispania, SAU. Calle Xaudaro, 5, 28034, Madrid.	
ASUNTO Actualización de las advertencias de seguridad y de las IFU de los ventiladores Oxylog 3000 plus, debido a que podría detenerse la ventilación por agotamiento de la batería, a pesar de estar conectados a la red eléctrica, por un problema del circuito de carga.	
INFORMACION ADICIONAL En mayo de 2023 el fabricante emitió una nota de aviso informando de que, en determinadas circunstancias, se podría producir un fallo de conexión del dispositivo a la red eléctrica, y detenerse la ventilación por una descarga de la batería, a pesar de estar conectado a la red. La AEMPS transmitió esta información el 24 de mayo de 2023, alerta 2023-245. La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para informar que, además de la actualización del firmware, va a actualizar las IFU del producto, para añadir una comprobación adicional de seguridad antes del transporte y evitar que este se inicie con una alarma activa de <<Batería interna no carga>>.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa para clientes nuevos.• Nota de aviso empresa para clientes antiguos.• Suplemento a las IFU.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

