

Oxylog 3000 *plus*

Information on battery operation



Supplement

de · en · enCA · bg · cs · da · el · es · fi · fr · hr · hu · id · it · ja ·
ko · lt · lv · nl · no · pl · ptBR · ro · ru · sk · sl · sr · sv · tr · vi · zh

WARNING

To properly use this medical device, read and comply with the instructions for use and this supplement.

de	Ergänzung	3
en	Supplement.....	5
enCA	Supplement.....	7
bg	Допълнение	9
cs	Dodatek	11
da	Supplement.....	13
el	Παράρτημα	15
es	Anexo.....	17
fi	Lisälehti.....	19
fr	Complément	21
hr	Dodatni dokument.....	23
hu	Kiegészítő dokumentum	25
id	Tambahan	27
it	Supplemento.....	29
ja	補足説明書	31
ko	부록.....	33
lt	Priedas.....	35
lv	Papildinājums	37
nl	Aanvullingsdocument.....	39
no	Tilleggsdokument.....	41
pl	Suplement.....	43
ptBR	Documento suplementar.....	45
ro	Fișă de completare	47
ru	Приложение.....	49
sk	Dodatok	51
sl	Priloga.....	53
sr	Dodatak	55
sv	Tilläggsinformation	57
tr	Ek bilgi sayfası	59
vi	Phần bổ sung.....	61
zh	增补.....	63

Anexo a las instrucciones de uso

Instrucciones de uso	Número de referencia	Edición
Oxylog 3000 plus	5705309	1 – 2009-05 y superior

- Guarde este suplemento junto con las instrucciones de uso.


Este suplemento actualiza la información de las instrucciones de uso en los siguientes capítulos.

Preparación

Carga de la batería

Antes de utilizar un dispositivo con batería, debe verificarse que la función de carga está libre de errores. De lo contrario, existe el riesgo de que el dispositivo no conmute del funcionamiento con batería al funcionamiento con red.

1. Conecte el dispositivo a la alimentación eléctrica.

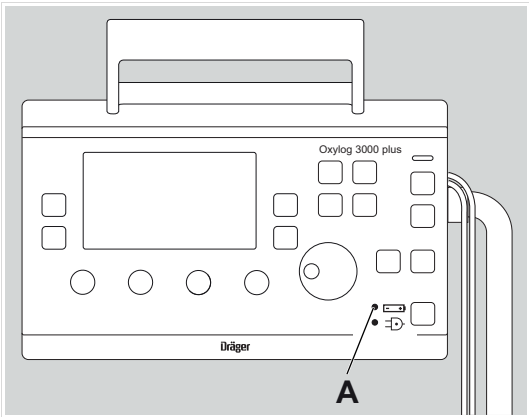

2. Compruebe el estado del indicador de tres colores (A) como se indica a continuación:

Símbolo del indicador	Indicador verde	Indicador amarillo	Indicador rojo	Procedimiento
A	x	-	-	Funcionamiento con batería posible
A	-	x	-	
A	-	-	x	Retire la batería y vuelva a introducirla o bien Sustituya la batería

Resolución de problemas

Mensajes en el campo de mensajes de alarma

Alarma	Causa	Solución	Rango
! Batería interna no se carga	La batería interna no puede cargarse. La batería está defectuosa o el ambiente es demasiado frío/caliente.	Para confirmar la alarma, pulse la tecla Alarma reset . Extraiga la batería interna y vuelva a introducirla o sustitúyala. No separe el dispositivo de la fuente de alimentación eléctrica externa al hacerlo.	44

 Manufacturer
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck
Germany
+49 451 8 82-0

www.draeger.com

9513844

© Drägerwerk AG & Co. KGaA

Edition: 1 – 2024-08

Dräger reserves the right to make modifications to the medical device without prior notice.

